


# Redosled uzorkovanja BD Vacutainer® epruvetama pri vađenju krvi

*Kreirano za vašu sigurnost*

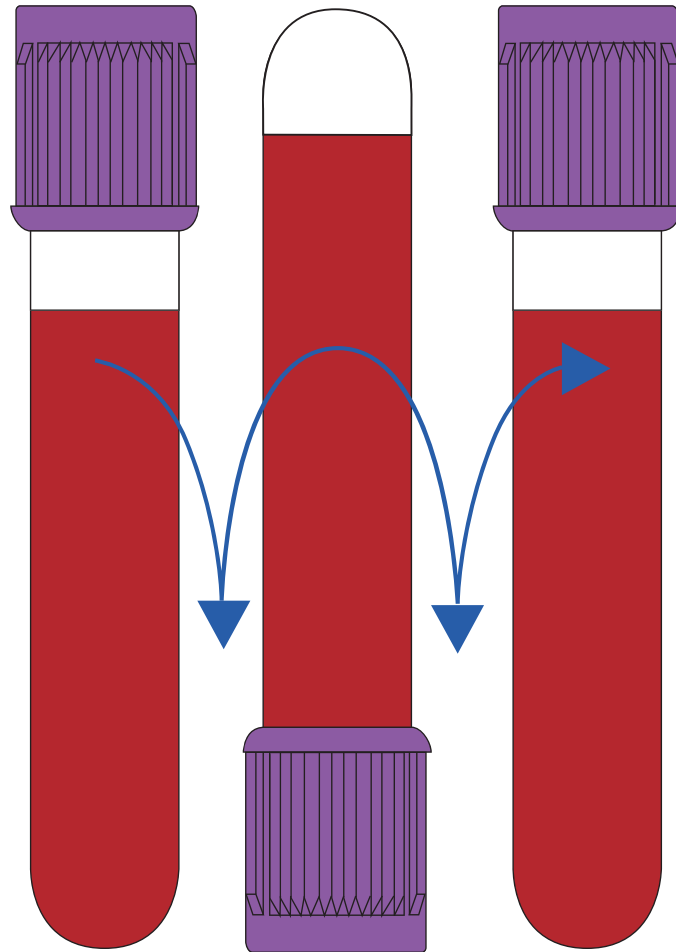

**= 1 inverzija**



Helping all people  
live healthy lives

**Prilikom vađenja  
krvi uvek sledite  
protokole vaše  
ustanove**













Sa svim biološkim uzorcima i oštrim delovima sistema za prikupljanje krvi (lancete, igle, luer adapteri) obavezno postupajte prema pravilima i procedurama vaše ustanove. Obratite odgovarajuću medicinsku pažnju u slučaju bilo kakvog dodira sa biološkim uzorcima (npr. ubodne povrede), budući da postoji mogućnost prenošenja virusnog hepatitisa, HIV-a (AIDS) ili drugih infektivnih bolesti. Ako sistem ima ugrađeni zaštitni poklopac za iglu, koristite ga. BD ne preporučuje vraćanje korišćenih igala u zatvarač igle, ali ako su pravila vaše ustanove drugačija, poštujujte vašu proceduru. Odbacite svaki sistem za vađenje krvi (igle) u kontejnere, koji su namenjeni odlaganju opasnog biološkog otpada.

[www.bd.com/vacutainer](http://www.bd.com/vacutainer)

# BD Diagnostics - Preanalytical Systems

## Redosled uzorkovanja BD Vacutainer® epruveta pri vađenju krvi i uputstvo za pravilno mešanje (inverzije)

Sve BD Vacutainer® epruvete zahtevaju mešanje inverzijom neposredno nakon vađenja krvi  
Uzorke krvi treba uzimati ovim redosledom:

Boja koda	Vrsta epruvete	Parametri	Broj inverzija prilikom mešanja
plava ljubičasta	 Hemokultura	Prvo aerobne, pa zatim anaerobne	8-10 puta
svetlo plava	 Natrijum citrat	Za određivanje parametara koagulacije u plazmi	3-4 puta
crna	 ESR	Za određivanje sedimentacije eritrocita	8-10 puta
crvena	 Serum	Za određivanje parametara iz seruma u biohemiji	5-6 puta
zlatna	 SST™ II Advance	Za određivanje parametara iz seruma u biohemiji - sa gel separatorom	5-6 puta
narandžasta	 RST	Za određivanje parametara iz seruma u biohemiji - sa Trombinom i gel separatorom	5-6 puta
zeleno	 Heparin	Za određivanje parametara iz plazme u biohemiji	8-10 puta
svetlo zeleno	 PST™ II	Za određivanje parametara iz plazme u biohemiji - sa gel separatorom	8-10 puta
svetlo ljubičasto	 EDTA	Za određivanje parametara iz pune krvi u hematologiji	8-10 puta
roze	 Cross Match	Crossmatch epruvete za određivanje parametara u krvi kod pacijenata u transfuziji	8-10 puta
siva	 NaF/NaEDTA	Za određivanje glukoze u krvi	8-10 puta
teget	 Elementi u tragovima	Za određivanje elemenata u tragovima, toksikoloških i nutritivnih parametara	8-10 puta

Nedovoljno mešanje može dovesti do netačnih rezultata, te potrebe za ponovnim uzorkovanjem krvi REF: (CLSI H3-A6)

**BD Vacutainer® distributed by:**  
VICOR d.o.o. Bulevar maršala Tolbuhina 42  
11070 Novi Beograd  
tel/fax: 011/ 30 16 492  
011/ 30 16 493, 011/ 31 96 756  
www.vicor.rs



**BD Diagnostics**  
Preanalytical Systems  
e-mail: EMA\_PAS@bd.com